

Tek Kullanımlık Endoskopik Distal Ataçman




Tek Kullanımlık Endoskopik Distal Ataçman

KULLANIM AMACI

İyi görüş alanını korumak için endoskopun distal ucuna monte edilmelidir.
Kolonoskopi işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

KURULUM

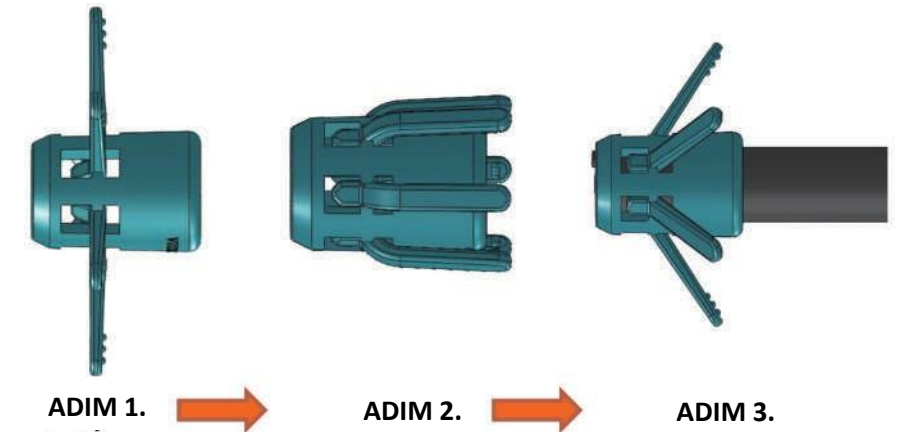

Önerilen tek kayganlaştırma maddesi sudur.

Adım 1. Endo-wing ürününü entegre ambalajdan çıkarın;
Adım 2. Kanatları eldeki ataşmana geri tutun;
Adım 3. Endoskopun ucu çalışma ucuna ulaşana kadar endoskopun ucuna yavaşça takın.

SPESİFİKASYONLAR

Model	Distal Boyut	Eşleşen kolonoskop modeli
XT-DL-132AB XT-DL-132A	12.2-13.2mm	Olympus
		CF-HQ290,CF-Q290series
		CF-H260,CF-Q260 series
XT-DL-115A	10.5-12mm	Olympus
		PCF-Q260,PCF-H290 series
		EC-3470,EC-3490 series
XT-DL-132AB XT-DL-132A	12.2-13.2mm	Pentax
		EC-3830,EC-3870,EC-3890 series
		EC-590,EC-450,EC-530,EC-250,EC-99 series
XT-DL-115A	10.5-12mm	Fujinon
		EC-450MP5,EC-600 series
		EC-3470,EC-3490 series